

NEBULIZADOR ULTRASÓNICO

NUOVO **PICCOLO** N61

MANUAL DE USO RÁPIDO



**ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO ES
OBLIGATORIO LEER EL MANUAL DE USO.**

Centro de descargas SILFAB:
descargas.silfab.com.ar/nebulizadores



ESCANEA EL
CÓDIGO QR,
Y DESCARGA
EL MANUAL
DE USO N61.




SILFAB

La información presente en este manual debe complementarse con el manual de uso de nebulizadores ultrasónicos correspondiente.

01 CONTENIDO DEL PACKAGING



NEBULIZADOR (N61)



FUENTE DE ALIMENTACIÓN (FA5C)



MANUAL DE USO RÁPIDO



Todas las partes componentes son requeridas para el correcto funcionamiento del equipo. No usar ningún otro accesorio que no haya sido adquirido al fabricante. Los materiales que entran en contacto con el paciente o usuario son no tóxicos.

Accesorios Kit de Nebulización (P63)



MÁSCARA GRANDE (P59)



MÁSCARA CHICA (P59)



MANGUERA CORRUGADA (P53)



ADAPTADOR BUCAL (P66)

Accesorios OPCIONALES:





CALEFACTOR (N70A)



MANGUERA CORRUGADA CORTA (P54)

1.1 PARTES DE TU NEBULIZADOR

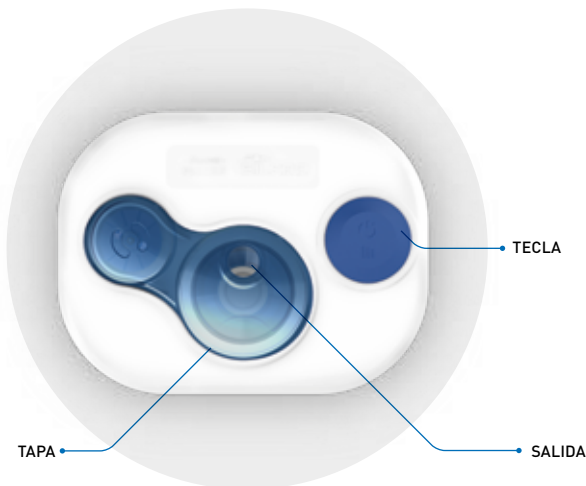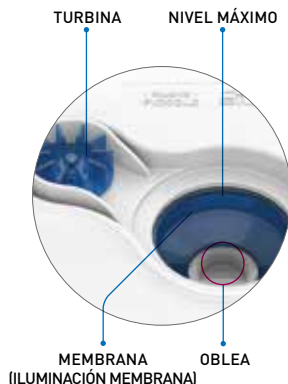

02 CÓMO UTILIZAR TU NEBULIZADOR

 Si vas a utilizar el equipo por primera vez, desinfectar los accesorios según lo indicado en Limpieza y desinfección del manual de uso.

A COLOCACIÓN DEL MEDICAMENTO

- Quitar la tapa.
- Colocar en la membrana la solución a nebulizar* en las proporciones indicadas por el profesional médico.
- Colocar la tapa.

(*) No provisto con dosificador.

 No superar el Nivel Máximo (10ml).



B CONEXIÓN DE ACCESORIOS

- Conectar un extremo de la manguera en la salida.
- Conectar el adaptador bucal o la máscara en el otro extremo de la manguera.
- Conectar la fuente de alimentación al nebulizador y a la red de energía eléctrica, el led principal se encenderá y se emitirá una señal sonora para indicar que el equipo se encuentra energizado.



C FUNCIONAMIENTO

- Encender el nebulizador presionando la tecla . La segunda luz de la membrana se encenderá y emitirá una señal sonora.
- Seleccionar la cantidad de aerosol presionando la tecla .

Nota:

Al encender el nebulizador obtendrá mayor cantidad de aerosol.

Al presionar por segunda vez la tecla obtendrá una cantidad de aerosol media.

Al presionar por tercera vez la tecla obtendrá la menor cantidad de aerosol.



- Realizar el proceso de nebulización de acuerdo a lo indicado por el médico.
- Terminado el proceso de nebulización apagar el equipo presionado "II" (aproximadamente 4 segundos). La iluminación de la membrana se apagará y se emitirá una señal sonora.



El equipo posee un temporizador de seguridad, luego de 5 minutos de uso la unidad se apagará automáticamente. Si se requiere continuar con la nebulización, se deberá encender el equipo nuevamente. Nunca realizar más de 3 nebulizaciones (2 re-encendidos), seguidas. En caso de requerirlo se deberá aguardar por lo menos 45 minutos antes de encender la unidad nuevamente.



⌚ Modo de funcionamiento: 15 min. encendido-45 min. apagado.

👤 Para más información, leer el manual de uso.

Nebulizador ultrasónico Modelo N61, Marca Silfab.

Producto Autorizado por la ANMAT PM-97-03

Director técnico: Bioing. Diego Fontana.

Matrícula COPITEC: 5611.

USO SIN PRESCRIPCIÓN.

SILFAB



- Por **problemas técnicos**, consultanos a:

Mail: postventa@silfab.com.ar.

- Para otras **consultas o reclamos** a:

Mail: sac@silfab.com.ar  WhatsApp: (+54) 9 11 3417-0606

- **Servicios Técnicos Oficiales** y accesorios:

www.silfab.com.ar

¡SEGUINOS!



AG-MUR61 v04 última revisión enero 2024.
Complemento del MUNU2.

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso.



Escaneá el código QR >>

para acceder al video del

Unboxing & Modo de

Uso de tu Nebulizador.

www.youtube.com/c/SILFAB_ok

SILVESTRIN FABRIS S.R.L. INDUSTRIA ARGENTINA

Av. Del Barco Centenera 3481 | C1437ACG | C.A.B.A. Argentina.

☎ (+54-11) 5368-2525

CALIDAD RESPALDADA
por certificación
ISO 13.485



**INDUSTRIA
ARGENTINA**

AUTORIZADO POR
anmat