

# NEBULIZADOR

## miniMESH<sup>NM10</sup>



### MANUAL DE USO RÁPIDO



ANTES DE UTILIZAR EL  
EQUIPO ES OBLIGATORIO  
LEER EL MANUAL DE USO.

Centro de descargas:  
[descargas.silfab.com.ar/nebulizadores/nm10](https://descargas.silfab.com.ar/nebulizadores/nm10)



ESCANEA EL  
CÓDIGO QR,  
Y DESCARGÁ  
EL MANUAL  
DE USO  
NM10.

  
**SILFAB**

# 01 CONTENIDO DEL PACKAGING

CABEZAL (CAB)



UNIDAD PRINCIPAL



BOLSA CONTENEDORA




MANUAL DE USO RÁPIDO



## Accesorios Kit de Nebulización (A-NM1)



MÁSCARA CHICA

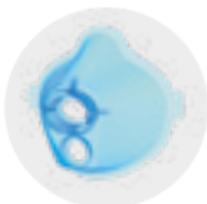

MÁSCARA GRANDE



ADAPTADOR BUCAL




ELÁSTICOS PARA MÁSCARAS




ADAPTADOR OPCIONAL  
USB-C a USB-A (USBC-A)

## 1.1 PARTES DE TU NEBULIZADOR

CABEZAL (CAB)

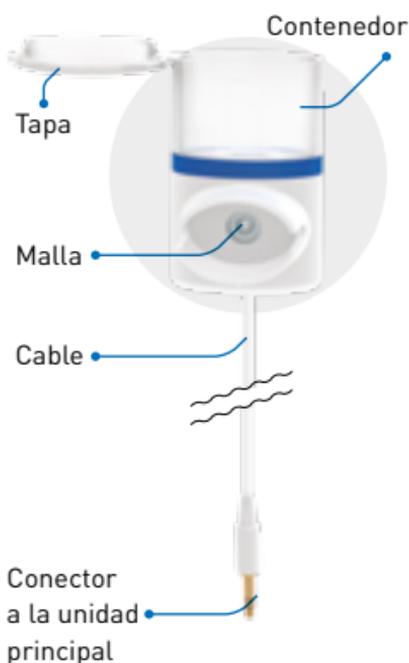

UNIDAD PRINCIPAL

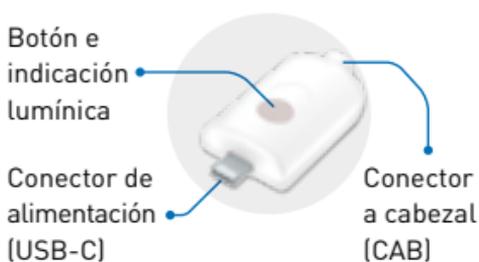

### REFERENCIA LUMÍNICA

Luz	Estado de la Unidad principal
 SIN LUZ	Desconectado.
 VERDE	Energizado (apagado).
 AZUL	Encendido.
 AZUL PARPADEANDO	Auto limpieza.

## 02 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

### ⚠ IMPORTANTE

- NO sumergir el cabezal y/o la unidad principal.
- NO hervir los accesorios, cabezal y/o unidad principal. NO usar microondas para secar las partes.
- NO higienizar las máscaras con sustancias tales como hipoclorito de sodio (lavandina).
- NO tocar la malla con hisopos, cepillos, dedos, ni ningún elemento punzante.
- Luego de cada uso limpiar el equipo.

### A FUNCIÓN AUTOLIMPIEZA DEL CABEZAL

**Abrir la tapa y enjuagar el contenedor** con agua filtrada o mineral, descartar el excedente.

**Autolimpieza:** Colocar dentro del contenedor aproximadamente 2 ml de agua filtrada o mineral. Apretar 2 (dos) veces el botón "⏻", la luz azul comenzará a parpadear; mantener en forma vertical el cabezal. Al finalizar el proceso de autolimpieza, el nebulizador se apagará

automáticamente, la luz azul dejará de parpadear y se encenderá nuevamente la luz verde. Descartar el líquido excedente del interior del cabezal.

### ⚠ ATENCIÓN

NO utilizar agua corriente o destilada.



### B LIMPIEZA

- **Desconectar** la unidad principal del celular y luego del cabezal, quitar el accesorio (máscara o adaptador bucal).
- **Limpiar el accesorio** en un recipiente con agua (filtrada o mineral) durante unos minutos. Secar con un paño limpio o gasa.
- **Limpiar el exterior del cabezal y la unidad principal** con un paño

levemente humedecido en agua (filtrada o mineral). EVITAR el contacto con la malla.

### ⚠ ATENCIÓN

NO sumergir el cabezal y/o la unidad principal.



### C DESINFECCIÓN

- **Desinfectar** los accesorios y el exterior del cabezal con un paño limpio embebido en alcohol etílico al 70%, luego secar. EVITAR el contacto con la malla.

### ⚠ ATENCIÓN

Realizar la desinfección antes del guardado del equipo o bien una vez al día si se nebuliza frecuentemente. También si es usado por más de una persona.

### ⚠ IMPORTANTE

Para realizar la limpieza y/o desinfección del celular o powerbank seguir las recomendaciones del fabricante de los mismos.


## 03 CÓMO UTILIZAR TU NEBULIZADOR

### ⚠ IMPORTANTE

- Desinfectar el equipo si es utilizado por primera vez, si no fue usado durante un período de tiempo prolongado o si fue utilizado por otra persona.
- Antes de encender el nebulizador colocar la solución a nebulizar, el equipo no debe permanecer encendido si no cuenta con solución.
- Conectar el cabezal ÚNICAMENTE a la unidad principal.
- No derramar agua u otros líquidos sobre la unidad principal, el cabezal, cable y/o conectores, estas partes no son impermeables. Si se derrama líquido sobre estas partes, secar con un paño o papel absorbente.
- No conectar ni utilizar el equipo si la unidad principal y/o el cable/ conector del cabezal se encuentran mojados.
- No utilizar el nebulizador sin indicación médica o para otro uso que no sea el previsto (por ejemplo, como humidificador, o aromatizador de ambiente).

### A PREPARACIÓN DE ACCESORIOS

Enhebrar uno de los elásticos en los orificios de la máscara, siguiendo la imagen.

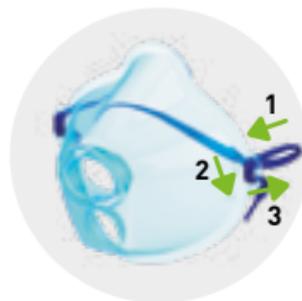

### B PREPARACIÓN DEL EQUIPO


**Conectar el cabezal a la unidad principal,** cerciorándose de que el conector entre COMPLETAMENTE hasta hacer tope con la unidad.

**Conectar la unidad principal mediante el USB-C al celular** (no incluido). La iluminación verde se encenderá indicando que el equipo se encuentra energizado.


Nota: Verificar que la funda del celular no impida la correcta conexión. De ser necesario, remover la funda.



**Colocar el accesorio elegido en el cabezal entre las siguientes opciones:**

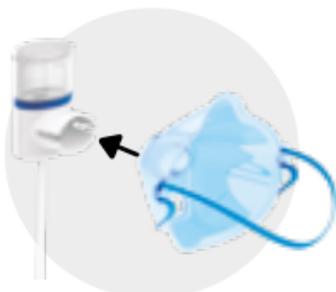

Máscara grande o chica al cabezal.

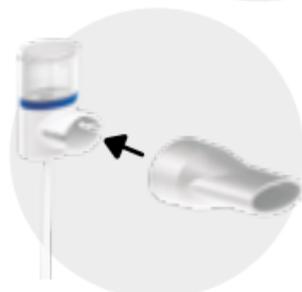

Adaptador bucal al cabezal.

## ATENCIÓN

Utilizar como **fente de alimentación únicamente un celular** o en su defecto un powerbank (NO utilizarlo mientras se esté cargando).

- El equipo no es compatible con el puerto "Lightning" de Apple.
- La fuente de alimentación deberá estar encendida y con un nivel de carga mayor a 50%.

## C FUNCIONAMIENTO




- 1 Agregar la solución a nebulizar** en el interior del contenedor.



- 2 Encender el equipo** presionando una vez el botón "⏻" (la iluminación pasará de verde a azul).



- 3 Realizar el proceso de nebulización.** La iluminación permanecerá azul.

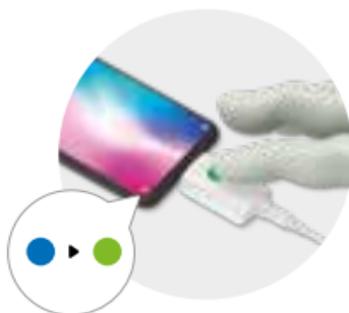

- 4 Apagar el equipo** apretando una vez el botón "⏻", la iluminación pasará de azul a verde.

- 5 Realizar la limpieza del equipo** siguiendo los pasos del punto 2.

## ATENCIÓN

- Durante el proceso de nebulización, el cabezal debe permanecer en posición vertical o levemente inclinado (no más de 15 ° con respecto a la vertical) para no afectar el correcto funcionamiento.
- No utilizar con líquidos que contengan éter, sustancias grasas, partículas en suspensión, incluyendo aceites esenciales ni hierbas.
- El equipo posee un temporizador de seguridad, luego de 25 minutos se apagará. Si requiere continuar con la nebulización deberá encenderlo nuevamente.

## 04 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tienes algún inconveniente o duda acerca del funcionamiento de tu equipo, escanea el QR de la primera página o dirígete a [descargas.silfab.com.ar/nebulizadores/nm10](http://descargas.silfab.com.ar/nebulizadores/nm10). Revisá el manual de uso extendido y mirá los videos disponibles.

  
**SILFAB**

- Por **problemas técnicos**, consultanos a:

Mail: [postventa@silfab.com.ar](mailto:postventa@silfab.com.ar).

- Para otras **consultas o reclamos** a:

Mail: [sac@silfab.com.ar](mailto:sac@silfab.com.ar)

 WhatsApp: (+54) 9 11 3417-0606

- **Servicios Técnicos Oficiales** y accesorios:

[www.silfab.com.ar](http://www.silfab.com.ar)



¡SEGUINOS!



Nebulizador Mesh Modelo NM10, Marca Silfab.

Producto Autorizado por la ANMAT PM-97-100

Director técnico: Bioing. Diego Fontana. Matrícula COPITEC: 5611.

USO SIN PRESCRIPCIÓN.

 **SILVESTRIN FABRIS S.R.L. INDUSTRIA ARGENTINA**

Av. Del Barco Centenera 3481 (C1437ACG) C.A.B.A. Argentina.

☎ (54-11) 5368-2525

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso.

