

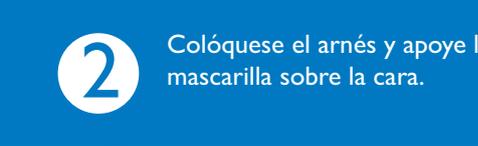
Confort de gel para dormir mejor

Mascarilla facial Amara Gel de Philips Respironics

Guía para ajustar la mascarilla

- 
- 1** Antes de colocarse la mascarilla, sujete los clips del arnés y gírelos tirando hacia afuera para desacoplarlos.

Nota: *lávase las manos y la cara antes de usar la mascarilla; evite el uso de hidratantes y lociones.*

- 
- 2** Colóquese el arnés y apoye la mascarilla sobre la cara.

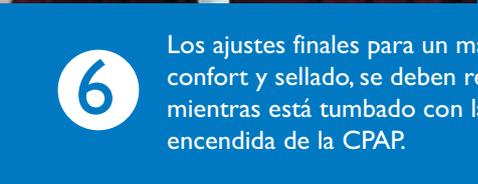
Nota: *puede que tenga que aflojar el arnés para hacerlo más grande.*

- 
- 3** Mientras sujeta la mascarilla en la posición adecuada, acople de nuevo los clips en la montura haciendo presión.

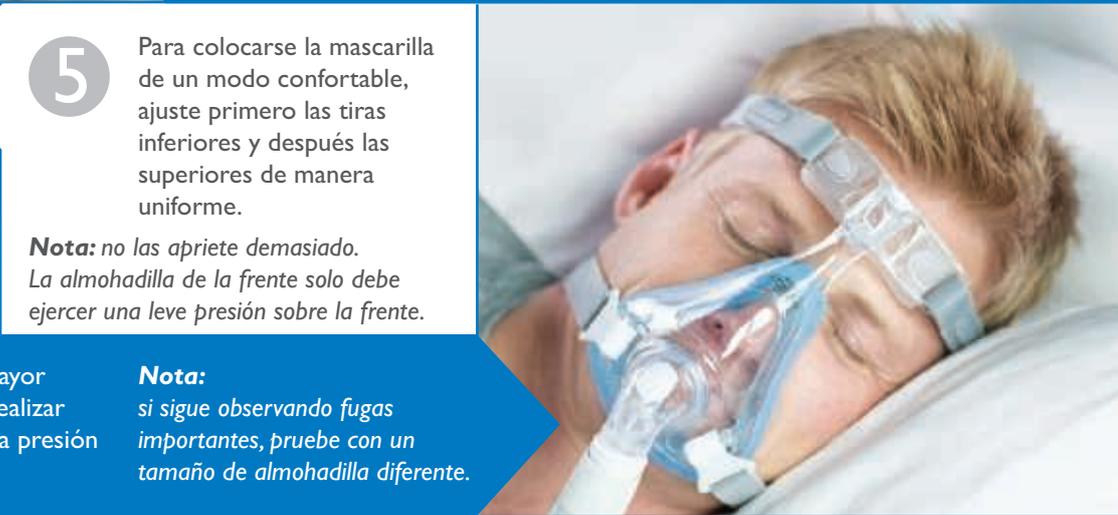
Nota: *el arnés debe encontrarse en posición plana sobre la parte posterior de la cabeza.*

- 
- 4** El mecanismo que se encuentra a la altura de la frente dispone de un botón de ajuste. Manténgalo presionado hasta abrirlo al máximo alejándolo del rostro.

Nota: *debería sentir una leve presión sobre el puente de la nariz.*

- 
- 5** Para colocarse la mascarilla de un modo cómodo, ajuste primero las tiras inferiores y después las superiores de manera uniforme.

Nota: *no las apriete demasiado. La almohadilla de la frente solo debe ejercer una leve presión sobre la frente.*

- 
- 6** Los ajustes finales para un mayor confort y sellado, se deben realizar mientras está tumbado con la presión encendida de la CPAP.

Nota: *si sigue observando fugas importantes, pruebe con un tamaño de almohadilla diferente.*

Puede encontrar más información sobre el ajuste en las instrucciones que vienen con la mascarilla. Asimismo, puede solicitar un arnés de mayor tamaño.

Si desea más información, visite www.philips.com/respironics

MCI 4106309 PN448949

PHILIPS
RESPIRONICS

