



NEBULIZADOR
A PISTÓN

SILFAB

PIUVENTO . N26

Con área ergonómica.



¡EMPECEMOS!

MANUAL DE USO RÁPIDO



01 COMPONENTES DE TU NEBULIZADOR.

NEBULIZADOR (N26) + KIT COMPLETO DE NEBULIZACIÓN (P62)



Máscara grande (P59) → Máscara chica

Adaptador bucal (P66)

Pipeta (P71)

Manguera plástica (P52)

 Todas las partes componentes son requeridas para el correcto funcionamiento del equipo. No usar ningún otro accesorio que no haya sido adquirido al fabricante. Los materiales que entran en contacto con el paciente o usuario son no tóxicos.

PARTES DEL NEBULIZADOR



02 | INSTRUCCIONES DE USO.

- A** **COLOCACIÓN DEL MEDICAMENTO**
- Colocar el medicamento dentro de la pipeta nebulizadora.



- B** **CONEXIÓN DE ACCESORIOS**
- Conectar la pipeta y los demás accesorios al nebulizador.



Si se utiliza el equipo por primera vez, desinfectar los accesorios según lo indicado en [Limpieza y desinfección](#) del manual de uso.

- C** **FUNCIONAMIENTO**
- Enchufar y encender el nebulizador.
 - Realizar el proceso de nebulización de acuerdo a lo indicado por el médico.
 - Al finalizar la nebulización, apagar el equipo y desenchufarlo.



Modo de funcionamiento: 15 min. encendido-45 min. apagado.



Para más información, leer el manual de uso.



La tranquilidad de contar con un producto avalado.

Tu nebulizador SILFAB es el único avalado por la **Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR)**. En SILFAB ponemos a disposición de médicos y pacientes, un producto confiable para el tratamiento de las afecciones respiratorias.

De esta manera, te brindamos la tranquilidad de utilizar un producto que cuenta con la seriedad de la recomendación médica.

Además, todos nuestros productos están respaldados por las aprobaciones de la **Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica**.



ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

Autorizado por



CALIDAD RESPALDADA
por certificación
ISO 13.485

SILVESTRIN FABRIS S.R.L. INDUSTRIA ARGENTINA
▼ Av. Del Barco Centenera 3481 (C1437ACG) C.A.B.A. Argentina.
☎ (54-11) 5368-2525
✉ info@silfab.com.ar | 🌐 www.silfab.com.ar
USO SIN PRESCRIPCIÓN.

Nebulizador a pistón Modelo Piuvento N26, Marca SILFAB.
Producto Autorizado por la ANMAT PM-97-16
Director técnico: Bioing. Diego Fontana. Matrícula COPITEC: 5611.
Servicio Técnico Oficial y Accesorios: www.silfab.com.ar



Escaneá el código QR >>

para acceder al video del
**Unboxing & Modo de
Uso de tu Nebulizador.**

www.youtube.com/c/SILFAB_ok



Consultá nuestro catálogo online para conocer
nuestra línea completa de productos.

f   /SILFAB
www.silfab.com.ar

¡Yo, elijo SILFAB!

