

# NEBULIZADOR A PISTÓN NEOVENTO N27

## MANUAL DE USO RÁPIDO



ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO ES  
OBLIGATORIO LEER EL MANUAL DE USO.

Centro de descargas SILFAB:  
[descargas.silfab.com.ar/nebulizadores](http://descargas.silfab.com.ar/nebulizadores)



ESCANEA EL  
CÓDIGO QR,  
Y DESCARGÁ  
EL MANUAL  
DE USO N27.



  
**SILFAB**

La información presente en este manual debe complementarse con el manual de uso de nebulizadores ultrasónicos correspondiente.

# 01 CONTENIDO DEL PACKAGING



NEBULIZADOR (N27)



MANUAL DE USO RÁPIDO

Todas las partes componentes son requeridas para el correcto funcionamiento del equipo. No usar ningún otro accesorio que no haya sido adquirido al fabricante. Los materiales que entran en contacto con el paciente o usuario son no tóxicos.

## Accesorios Kit de Nebulización (P62)



MÁSCARA GRANDE (P59)



MÁSCARA CHICA (P59)



MANGUERA PLÁSTICA (P52)




ADAPTADOR BUCAL (P66)



PIPETA NEBULIZADORA (P71)

## 1.1 PARTES DE TU NEBULIZADOR

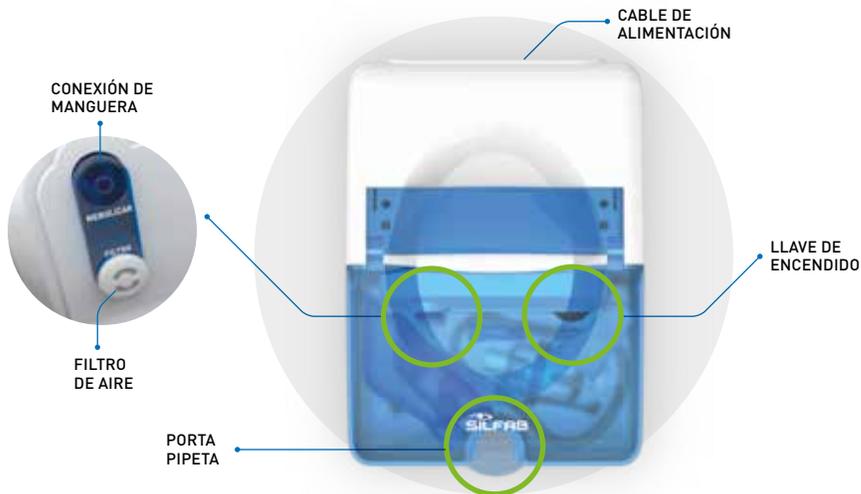

## 02 CÓMO UTILIZAR TU NEBULIZADOR

- ⚠ Si vas a utilizar el equipo por primera vez, desinfectar los accesorios según lo indicado en Limpieza y desinfección del manual de uso.

### A COLOCACIÓN DEL MEDICAMENTO

- Colocar el medicamento dentro de la pipeta nebulizadora.


[\*] No provisto con dosificador.

- ⚠ No superar el Nivel Máximo (10ml).



### B CONEXIÓN DE ACCESORIOS

- Conectar la pipeta y los demás accesorios al nebulizador.

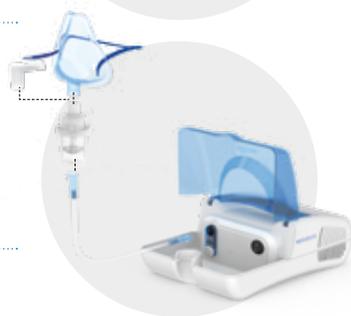

### C FUNCIONAMIENTO

- Enchufar y encender el nebulizador.
- Realizar el proceso de nebulización de acuerdo a lo indicado por el médico.

- ⚠ Nunca realizar una nebulización por más de 15 minutos. En caso de requerirlo se deberá aguardar por lo menos 45 minutos antes de encender la unidad nuevamente.

- 🕒 Modo de funcionamiento: 15 min. encendido-45 min. apagado.
- 📘 Para más información, leer el manual de uso.



Nebulizador a pistón Modelo NEOVENTO N27, Marca Silfab.  
Producto Autorizado por la ANMAT PM-97-16  
Director técnico: Bioing. Diego Fontana.  
Matrícula COPITEC: 5611.  
USO SIN PRESCRIPCIÓN.



Escaneá el código QR >>  
para acceder al video del  
**Unboxing & Modo de  
Uso de tu Nebulizador.**  
[www.youtube.com/c/SILFAB\\_ok](http://www.youtube.com/c/SILFAB_ok)



- Por **problemas técnicos**, consultanos a:  
Mail: [postventa@silfab.com.ar](mailto:postventa@silfab.com.ar).
- Para otras **consultas o reclamos** a:  
Mail: [sac@silfab.com.ar](mailto:sac@silfab.com.ar)  WhatsApp: (+54) 9 11 3417-0606
- **Servicios Técnicos Oficiales** y accesorios:  
[www.silfab.com.ar](http://www.silfab.com.ar)

### ¡SEGUINOS!



AG-MUR27 v06  
Última revisión enero 2024.  
Complemento del MUNP1.

Las fotografías y gráficas son meramente ilustrativas. Los productos podrán sufrir modificaciones en sus accesorios y/o colores sin previo aviso.

 **SILVESTRIN FABRIS S.R.L. INDUSTRIA ARGENTINA**  
Av. Del Barco Centenera 3481 (C1437ACG) C.A.B.A. Argentina.  
☎ (+54-11) 5368-2525

CALIDAD RESPALDADA  
por certificación  
ISO 13.485



AUTORIZADO POR  
